



HJÄLP TILL ATT STOPPA SPRIDNINGEN AV COVID-19

RECEPTFRITT SNABBSJÄLVTEST FÖR ATT UPPTÄCKA **AKTIV** COVID-19-INFJEKTION

Panbio™ COVID-19 antigensjälvttest upptäcker infektion hos personer med och utan symptom.

INGA ÅLDERSBEGRÄNSNINGAR

Godkänd för användning på barn under 14 år med stöd av en vuxen.



TILLFÖRLITLIGT VARUMÄRKE I MER ÄN 140 LÄNDER



ENKELT

procedur för
självspvtagning i
näsa



SNABBT

resultat på
15 minuter



TILLFÖRLITLIGT

testprestanda

UTMÄRKTA PRESTANDA FÖR PROVTAGNINGSPINNE FÖR NÄSAN*


	KÄNSLIGHET	SPECIFICITET
PANBIO™ COVID-19 AG RAPID TEST DEVICE (NASAL) PRESTANDA FÖR PROVTAGNING I NÄSA JÄMFÖRT MED PCR-TEST I NÄSA NÄR DET UTFÖRS AV UTBILDAD VÅRDPERSONAL	98,1%	99,8%

SJÄLVTESTDATA MED HÖGA PRESTANDA**

	POSITIV ÖVERENSSTÄMMELSE	NEGATIV ÖVERENSSTÄMMELSE
VID KLINISKA UTVÄRDERINGAR MED ANVÄNDARE SOM UTFÖRDE SJÄLVTEST IDENTIFIERADE PANBIO™ COVID-19 ANTIGEN SELF-TEST KORREKT POSITIVA OCH NEGATIVA SARS-CoV-2-PROVER**	95,2%	100%

ANVÄNDARVÄNLIG, ENKEL PROCEDUR


1 FÖRBERED MATERIELET

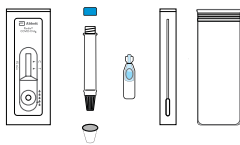

2 FYLL PROVRÖRET




3 SVABBA NÄSAN

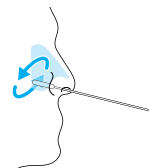


4 RÖR OM PROVET



5 BRYT PROVTAGNINGSPINNEN

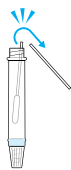

6 TILLSÄTT 5 DROPPAR

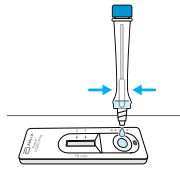

7 VÄNTA 15 MINUTER



8 LÄS RESULTAT



INDIVIDUELLT FÖRPACKADE MED INSTRUKTIONER FÖR SJÄLVTEST AV KONSUMENTER

KATALOGNUMMER	41FK51 (1 TEST)	
	41FK91 (4 TESTER)	
	41FK71 (10 TESTER)	
	41FK81 (20 TESTER)	
PAKETETS INNEHÅLL	• Testkassett	• Buffertflaska
	• Instruktioner för användning	• Provtagningspinne
	• Provrör	• Påse
	• Blått lock	• Provrörställ



KONTAKTA DIN LOKALA REPRESENTANT IDAG.

WWW.GLOBALPOINTOF CARE.ABBOTT

Produkten är inte tillgänglig i alla länder. Tillgänglig för konsumenter på utvalda marknader. Inte godkänd för försäljning i USA.

*I medicinsk diagnos är känsligheten förmågan hos ett test att korrekt identifiera de som har sjukdomen. Specificiteten är testets förmåga att korrekt identifiera de som inte har sjukdomen. Mer information om prestanda finns i produktens instruktioner för användning.

**Positiva och negativa överensstämmelseprocentatser visar hur väl ett test överensstämmer med ett andra jämförande test. Ju högre procentandel, desto starkare är överensstämmelsen mellan de två testerna. Över analyserade med Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test bekräftades som positiva och negativa genom jämförelse med Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasopharyngeal).

© 2021 Abbott. Med ensamrätt. Alla varumärken som omnämns tillhör Abbott-koncernen eller respektive ägare. Alla foton som visas är endast i illustrationssyfte. COL-04719-01, 06/21

